



より効果を感じていただくために、必ずご確認ください。

「エアボ・ウェーブ トゥキップ」 ご使用のしおり

装着方法



① トゥキップに足先を入れます



② 全体をゆっくり引き上げます



③ 足指のつけ根の位置を整えます



④ 足全体の密着感を整えます

アクティブシリーズ の特長

1 なめらかな肌触り

上質のオーガニックコットンと柔らかな凹凸形状が足全体を優しく包みます。

2 軽快な着け心地&細やかなフィット感

軽くて薄い構造と、日常の細やかな動きへのフィット感を最大限に追及しました。



圧迫力：
20~30
mmHg

■ 洗濯方法

普段通りそのまま洗濯機へ
天日干し・乾燥機も OK

ネット不要

柔軟剤・漂白剤の使用も OK

■ 表裏の見分け方



「サイズマーク」

「サイズマーク」赤3ケが
おもて面に見えていれば
正しい装着です

品質表示

・綿	45%
・ポリウレタン	30%
・ポリエステル	25%

■ 干し方

中面を裏返し、平干してください

<製品の返品・交換について> ・製品が未使用および出荷後1ヵ月以内の場合に承ります。

製造販売元:

三優メディカル株式会社

www.sanyu-medical.com

〒490-1144 愛知県海部郡大治町西條南井口58番地

TEL 052-526-5017 FAX 052-526-5018

E-mail info@sanyu-medical.com



三優メディカル
株式会社



オーガニックコットンを使用し、サステナブルな商品を目指しています。
オーガニックコットンとは、「自然環境や栽培に携わる人にやさしい素材」です。